


アステイオン Asteion

還元水素水・酸性水連続生成器


厚生労働省管理医療機器認証番号 21500BZZ00213A08



アステイオン寸法図

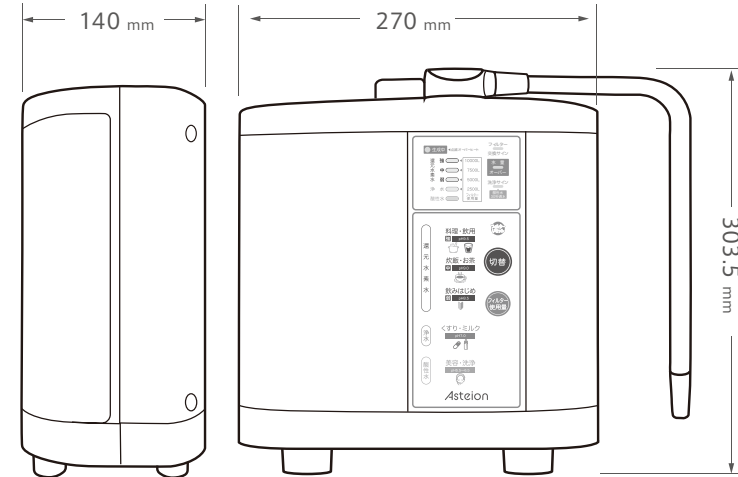

分岐栓の取付例

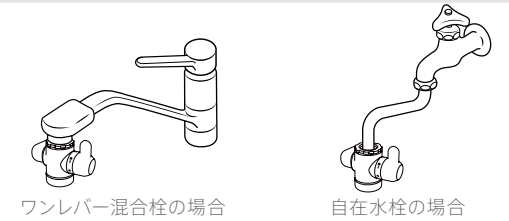

生成水 (pH)	還元水素水 強	pH9.3 ～ 9.5
	還元水素水 中	pH9.0 ～ 9.3
	還元水素水 弱	pH8.5 ～ 9.0
	浄 水	pH7.0
	酸 性 水	pH5.5 ～ 6.5

※水質・水圧によって処理水力、pH 値は変動する場合があります。

安全に関するご注意

- 安全にご使用いただくために、以下のことを必ずお守りください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ 警 告

- 次の方は、酸性水を使用する前に医師に相談してください。
 - ・肌の弱い方
 - ・アレルギー体質の方
- 酸性水を使用して肌に異常を感じたときは、速やかに使用を中止して医師に相談してください。
- 次の方は還元水素水を飲む前に医師に相談してください。
 - ・無酸症の方や、病気治療中の方
 - ・持病のある方、身体の弱っている方
 - ・腎臓に障害のある方（カリウム排泄障害などの腎疾患）
 - ・医師または歯科医師の治療を受けている方
- 還元水素水を飲用して身体に異常を感じたときは、速やかに使用を中止して、医師に相談してください。

⚠ 注 意

- 初めてご飲用される人は、中性に近い pH の還元水素水を少量から飲用してください。
- 次のものは還元水素水ではなく浄水をお使いください。
 - ・医薬品
 - ・ミルクや乳児用食品
- この製品は水専用なのでお湯は通水しないでください。
- 水道水など飲用基準に合格した水でご使用ください。
- 本製品は日本国内でご使用ください。

■標準仕様

参考小売価格 ¥195,800

一 般 的 名 称		連続式電解水生成器
厚生労働省管理 医療機器認証番号		21500BZZ00213A08
販 売 名		アステイオン
型 式		IE-400
消 費 電 力		最大 130W （待機時 1W 未満）
本 体	寸 法	高さ 303.5mm 幅 270mm 奥行き 140mm
	重 量	約 4.2kg
給水方式・接続		シャワー付分岐栓接続 3 段階（電解水・原水・原水シャワー）切り替え
電 解 方 法		水道直結連続式電解方法
電 解	処 理 水 力	還元水素水・酸性水・浄水 5.0L /分 (給水圧 0.2Mpa 時)
	電 解 能 力 切 替	還元水素水 3 段階・酸性水・浄水
	連続使用可能時間	約 30 分（水質・使用条件により異なります。）
	電 極 洗 浄	オートクリーニング方式（使用終了後毎回約 30 秒）
浄 水	使 用 ろ 過 材	抗菌粒状活性炭＋亜硫酸カルシウム
	ろ 過 能 力	12000 L (原水残留塩素 2ppm で 0.4ppm になる水量)
	除去できない部分	原水中に溶けている鉄イオン等
使用可能水圧		0.05 M pa ～ 0.3 M pa
カルシウム添加		強制溶解添加方式
使用最高水温		40℃
保 護 装 置		過電流プロテクト 温度保護 誤飲防止プロテクト等

取次店

PlanBee 株式会社 プランビー

〒940-2039 新潟県長岡市関原南 2-4077-1
【カスタマーサポート】 ☎050-1745-9000
《受付時間》平日 10:00 ～ 17:00
<https://planbee.co.jp>



還元水素水生成器は、家庭用管理医療機器

Asteion

還元水素水の使用目的又は効果 胃腸症状の改善

胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。



アスティオンは水道水をろ過して「浄水」に
それを電気分解して「還元水素水」「酸性水」を生成します。

飲用、お料理、洗顔まで。電解水で出来ること

還元水素水

pH8.5 ~ H9.5

- 膨潤作用
ものを柔らかく
- 溶解力
ものを溶かす
- 熱伝導
熱効率が良い

毎日の飲用やお料理に

- 飲用水
- お茶
- 炊飯
- お味噌汁



酸性水

pH5.5 ~ 6.5

- 収斂作用
引き締める
- 洗浄力
綺麗にする

弱酸性のアストリゼントとして美容に

- 洗顔
- 弱酸性の化粧水として
- 麺の茹で水
- 天ぷら
- 茹で卵



浄水

pH7.0

浄水フィルターで水道水に
含まれる塩素や鉛を除去

- 薬の服用
- 赤ちゃんのミルク作り




おいしい水と、電解水のメカニズム

3層構造のフィルターで不純物や残留塩素を除去

高性能フィルターが残留塩素、臭気、カビ、赤サビなどを除去し、カルシウムなどのミネラル成分は通します。


浄水フィルター内部構造

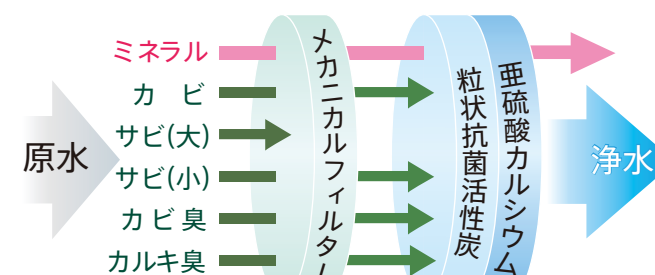


3枚の電極板で水道水を強力に電気分解

電解槽の電極板が電解水を毎分最大5リットル生成。長期間のご使用でも性能低下しない為のオートクリーニング機能も搭載。

アスティオン器械内部構造

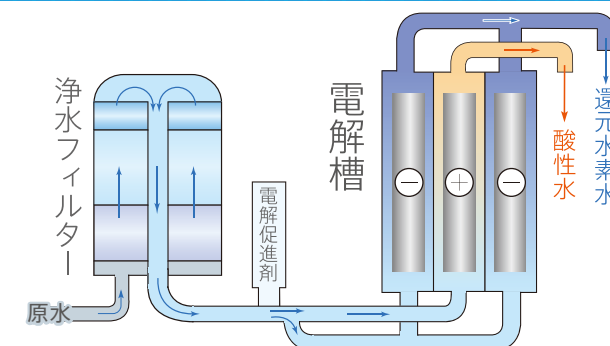

簡単操作で充実した機能

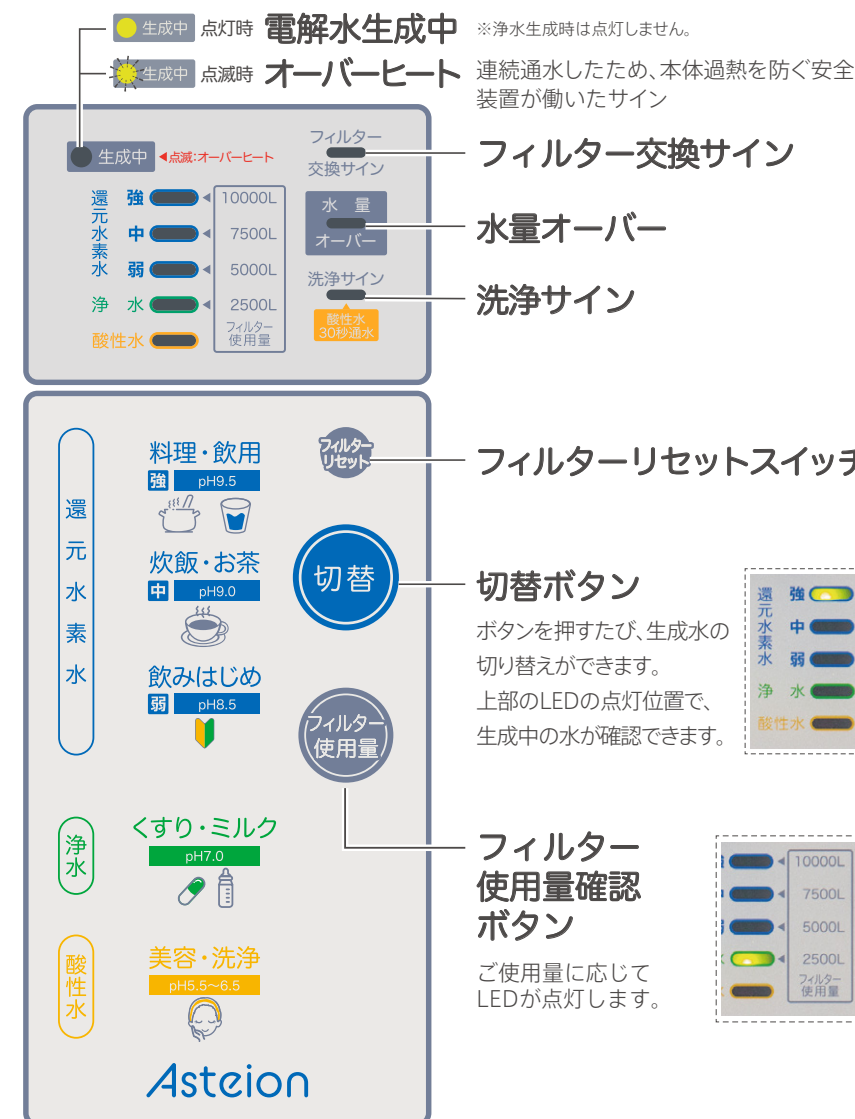

器械の情報をLEDでお知らせ

フィルター交換・本体洗浄のお知らせや
またフィルターをどれくらい使用している
のかをLEDで確認できます。

高い電解効率の電解槽

電解槽にはプラチナコーティングした
チタン電極板を3枚使用し、電極端子
を6個取り付けて、高い電解効率を実現しました。

ボタン1つで生成水を切替、 生成する水をLEDでご案内

切替ボタン一つで作りたい水用途
に合わせて簡単に生成できます。
選んだ水をLEDでご案内します。

厚生労働省管理医療機器製造 販売認証番号を取得済み (21500BZZ00213A08)

医療機器として認められているのは厚生
労働省から認証を受けた電解水生成器
だけです。美味しいだけでなく健康的な
お水を自信を持ってご提供できます。